



CL-2009-020

平成21年2月

お客様各位

アボット ジャパン株式会社

本社 / 〒 106-8535 東京都港区六本木 1-9-9
六本木ファーストビル

安全情報管理部 部長
鶴野 洋子

血糖測定電極 ホイル開封に関する重要なお知らせ

報告事例

今般、使用する数日前にホイル包装を開封した血糖測定電極を使用したことにより、本来より低い血糖値が得られた事例が報告されました。

適正な使用方法について

必ず使用する直前に電極のホイルを開封してください。


開封後時間が経過した電極では、測定値が低くなる可能性があります。

ホイルの開け方

①切り込み▲が右側になるように、左手で図のようにしっかり持つ

②切り込み▲の下を右手で持つ

③右手をひねりながら左下の方向にゆっくり切り裂く

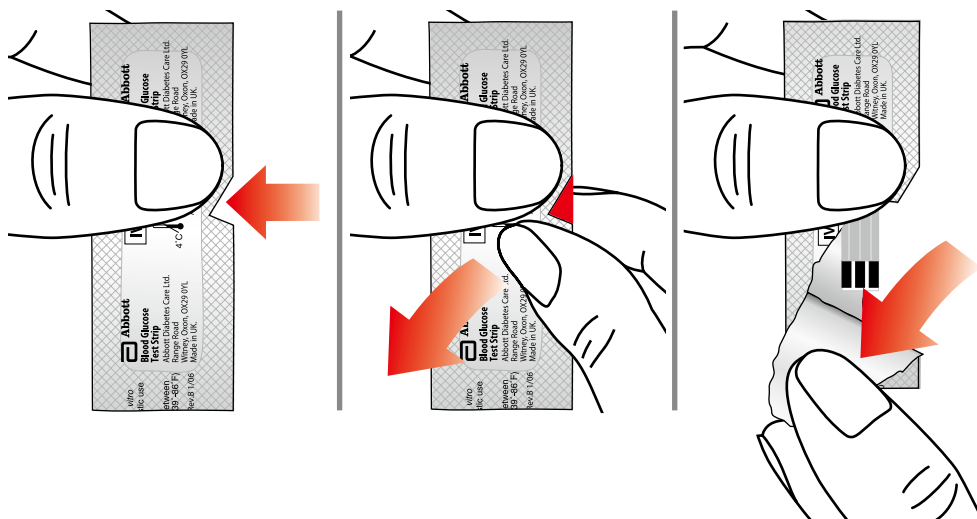

【お問い合わせ先】アボットジャパン株式会社 お客様相談窓口 0120-37-8055